


CUSTOM Abrbrace

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL - revisie 1 (12-2025)

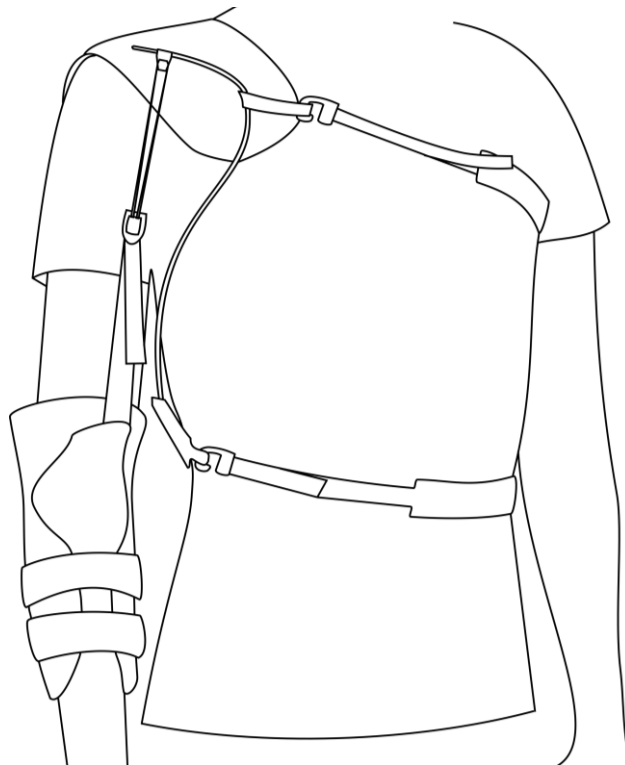

Innovatie in revalidatie



ALGEMENE INFORMATIE

Gelieve deze handleiding zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelaar of fabrikant.

BEOOGD GEBRUIK

De Mbrace is een custom-made schouderbrace die is bedoeld om de schouder te ondersteunen tijdens dagelijkse activiteiten, met behoud van functionele armbewegingen.

Het hulpmiddel is vervaardigd op voorschrift van een bevoegde zorgprofessional en ontworpen en vervaardigd voor één specifieke patiënt. De beugel wordt patiëntspecifiek ontworpen en vervaardigd op basis van individuele anatomische en functionele kenmerken. De Mbrace is uitsluitend bedoeld voor toepassing ter hoogte van de schouder.

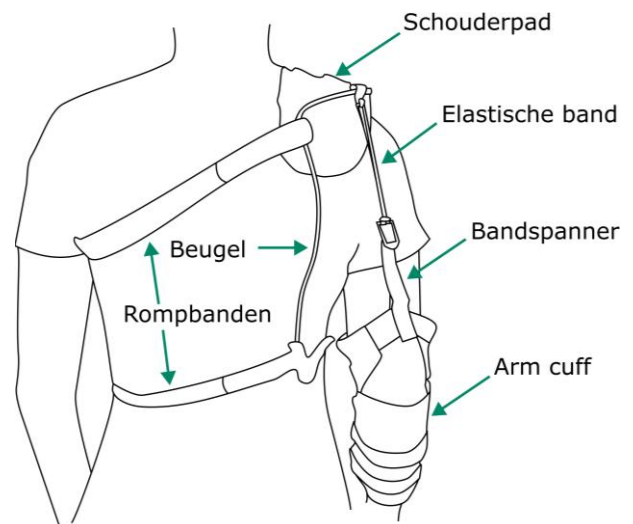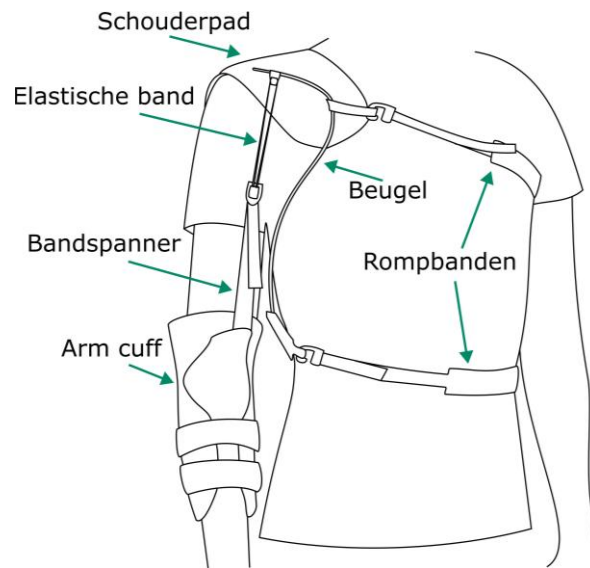

INDICATIES

Chronische, post-traumatische of postoperatieve pijnlijke schouder. De indicaties moeten worden vastgesteld door een arts.

CONTRA-INDICATIES

De volgende indicaties vereisen raadpleging van een arts:

- Huidaandoeningen/letsels (inclusief allergische of inflammatoire reacties) in het toepassingsgebied van de orthese.
- Sensorische en circulatiestoornissen in het gebied van de arm en hand.
- Verminderde lymfedrainage, inclusief weke delen zwellingen van onzekere oorsprong distaal van de orthese.
- Veneuze occlusie in de arm.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN


Gebruik de Mbrace uitsluitend volgens het voorschrift en de instructies van uw zorgprofessional en deze gebruiksaanwijzing. Dit medisch hulpmiddel is speciaal voor u op maat gemaakt en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door u. Gebruik door andere personen is niet toegestaan.




- Wijzigingen aan het product of gebruik anders dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing kunnen de veiligheid en werking beïnvloeden.
- Gebruik het product niet bij bekende overgevoeligheid voor de gebruikte materialen.
- Gebruik in combinatie met andere producten alleen na overleg met een zorgprofessional.
- Stop het gebruik en neem contact op met uw zorgprofessional of leverancier bij veranderingen, toename van klachten of andere ongewenste effecten.

MBRACE AANDOEN


1. Steek de arm door de beugel en de arm cuff (Fig. 1).
2. Lijn de 2 metalen D-ringen van de arm cuff uit met de elleboogrotatie-as (groene gestippelde lijn) en sluit het klittenband (Fig. 2).
3. Controleer de juiste positionering van de arm cuff en test of de elleboog vrij kan bewegen.
4. Laat de schouderpad rusten op de schouder, dicht bij de hals.
5. Wikkel de rompbanden om het lichaam (bovenste rompband net onder de oksel, onderste rompband net boven de heupen). Schuif de plastic haken door de lussen aan de voorkant van de beugel (Fig. 3).
6. Trek aan het uiteinde van de rompbanden, zodat de banden strak zitten en de brace op zijn plek blijft (Fig. 4).
7. Span de elastische banden aan door de bandspanners zo ver mogelijk omlaag te trekken (Fig. 5).

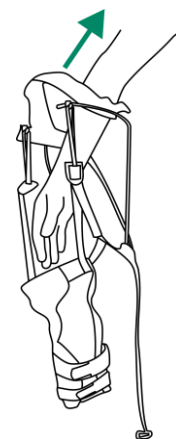


Figuur 1

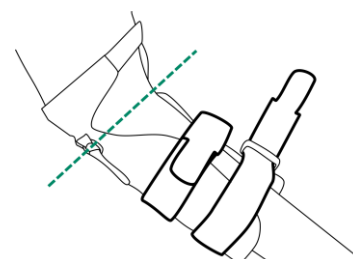


Figuur 2

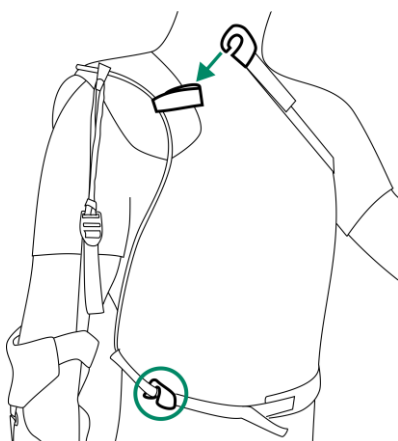

Figuur 3

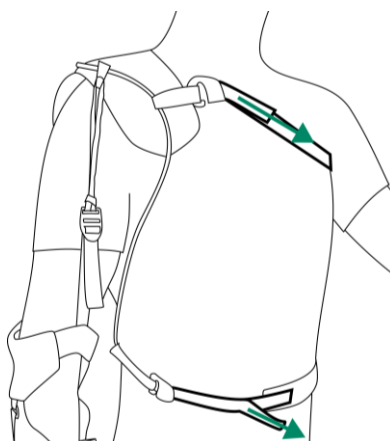

Figuur 4

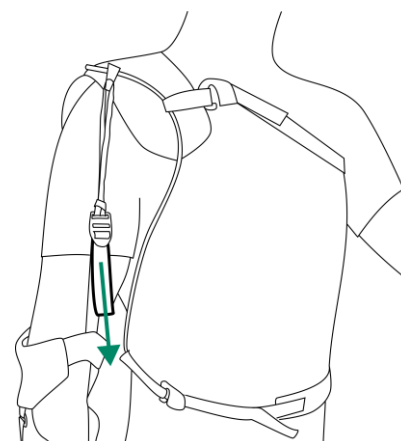

Figuur 5




- Controleer regelmatig of de elastische banden slijtage vertonen, vooral rond de bevestigingspunten.
- Controleer regelmatig de integriteit van de arm cuff, rompbanden en de beugel voordat u de Mbrace gebruikt.
- De druk die wordt uitgeoefend op het schoudergebied na het aantrekken van de banden moet comfortabel zijn. Als u ongemak ervaart in het schoudergebied, verminder dan de spanning van de elastische banden.
- Voorkom dat het klittenband te strak wordt aangetrokken (risico op belemmering van de bloedstroom) of te los (arm cuff glijdt omhoog tijdens gebruik).

MBRACE UITDOEN


1. Verminder de spanning van de rompbanden.
2. Maak de bovenste en onderste rompband los door de plastic haken uit de lusjes te tillen (Fig. 6).
3. Maak beide klittenbandsluitingen van de arm cuff los.
4. Schuif de Mbrace van het lichaam af (Fig. 7).
5. Verminder de spanning van de elastische banden door de bandspanners losser te maken.



Sluit het klittenband van de arm cuff na gebruik om schade aan kleding te voorkomen.

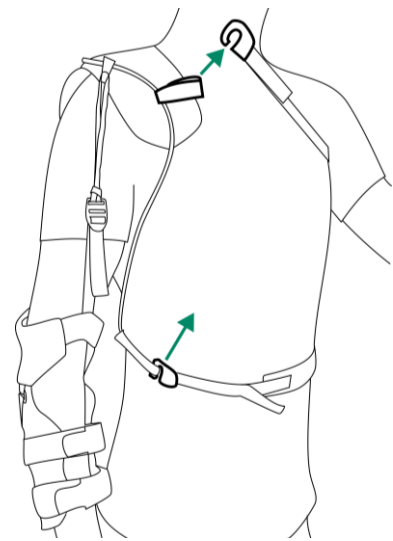

Figuur 6

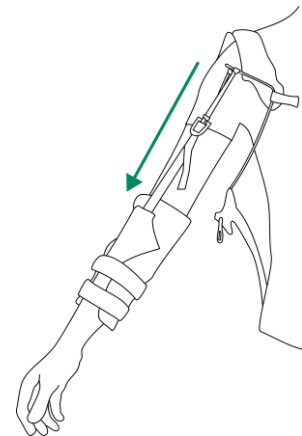

Figuur 7

REINIGINGSINSTRUCTIES

De stoffen delen van de Mbrace kunnen met de hand worden gewassen. De rompband(en) en arm cuff kunnen indien nodig van de beugel worden losgehaald en apart worden gewassen.

- Sluit alle klittenbandsluitingen om schade aan andere wasgoedstukken te voorkomen.
- Was de Mbrace met de hand in warm water (30°C) met een mild wasmiddel.
- Goed spoelen.
- Laat aan de lucht drogen.




Niet bleken, niet in de wasdroger drogen, niet strijken, niet chemisch reinigen.

SELECTIE EN BEVESTIGING ELASTISCHE BANDEN

Afhankelijk van de voorkeur, kan het aantal elastische banden worden aangepast om de mate van ondersteuning die de Mbrace aan de arm biedt te veranderen.


Het wordt aanbevolen om te beginnen met één of twee banden per zijde. Meer elastische banden bieden meer opwaartse kracht en dus meer ondersteuning aan de arm. Twee types elastische banden worden geleverd met de Mbrace: smalle en brede. De brede banden bieden meer ondersteuning dan de smalle banden. Beide kunnen worden gebruikt.

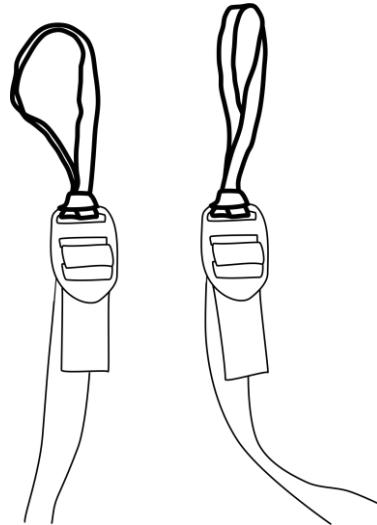

Figuur 13

Bevestiging van de gekozen elastische banden:


1. Haal de elastische banden door de plastic opening van de bandspanners.
2. Steek het ene uiteinde van de elastische band door de lus aan het andere uiteinde en trek stevig aan (Fig. 13).
3. Doe de arm cuff aan. Lijn de 2 metalen D-ringen van de arm cuff uit met de elleboogrotatie-as (groene gestippelde lijn) en sluit het klittenband (Fig. 14).
4. Controleer de juiste positionering van de arm cuff en test of de elleboog vrij kan bewegen.
5. Bevestig de elastische banden aan de haakjes van de beugel, zowel aan de voor- als de achterkant (Fig. 15).

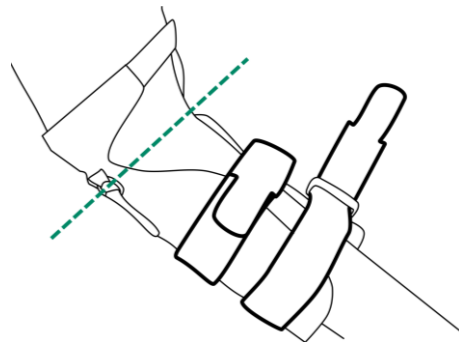

Figuur 14



Voor de beste resultaten, plaats een gelijk aantal elastische banden aan de voor- en achterzijde van de schouder. Zorg er ook voor dat het type elastische banden aan de voor- en achterzijde overeenkomen.

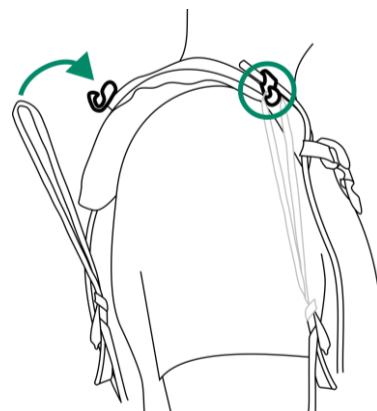

Figuur 15

MATERIAAL SAMENSTELLING

Polyamide, Staal, Softshell-stof (90% Polyester, 2% Elastaan, 8% Polyurethaan), Synthetisch polyisopreen (non-latex rubber).

GARANTIE

Dit hulpmiddel is vervaardigd volgens de geldende kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften. De wettelijke consumentenrechten van het land van aankoop blijven volledig van toepassing. Garantie is uitgesloten indien:

- het product niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing is gebruikt
- de gebruiksaanwijzing niet is gevolgd
- ongeoorloofde wijzigingen aan het product zijn aangebracht.

Neem voor vragen over garantie of service contact op met de fabrikant of de bevoegde distributeur.

MELDPLICHT

Vanwege lokale regelgeving bent u verplicht om onmiddellijk elk ernstig incident met betrekking tot het gebruik van dit medisch hulpmiddel te melden aan zowel de fabrikant als de verantwoordelijke autoriteit in uw land.

VERWIJDERING

Bij beëindiging van het gebruik moet het product worden verwijderd volgens de lokale regelgeving.

CUSTOM-MADE

Dit is een custom-made medisch hulpmiddel, vervaardigd op voorschrift voor één specifieke patiënt. Het hulpmiddel is bedoeld voor één patiënt – meervoudig gebruik.



Hankamp Rehab BV

Buurserstraat 198, 7544 RG

Enschede, Nederland

T +31 (0)53 47 53 232

info@hankamp.nl